


リラックスチェアマッサージャー DRC-1801

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

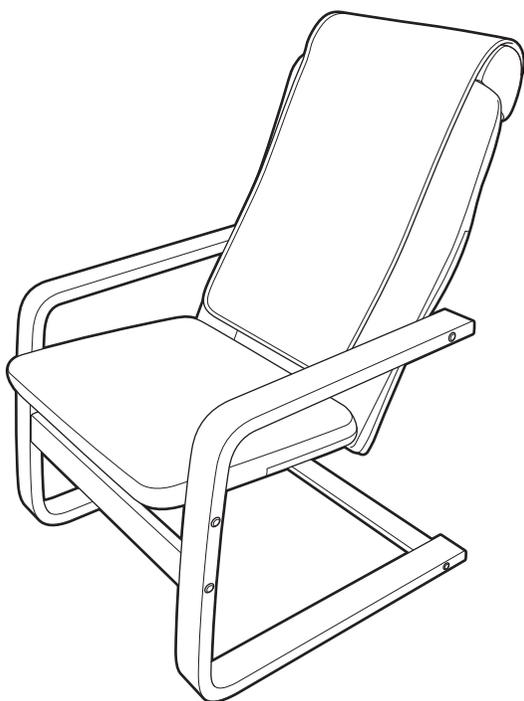

も く じ

安全上のご注意 P.2 ~ P.3	修理・サービスを依頼する前に P.14
各部の名称とはたらき P.4	仕様 P.15
組み立てかた P.5 ~ P.8	アフターサービスについて 裏表紙
正しい使いかた P.9 ~ P.13	保証書 裏表紙
お手入れと保存 P.13		

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「ACアダプターをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告

 指示	<p>医師の治療を受けている人や、次のような人は医師にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人。 ●安静を必要とする人。 ●悪性腫瘍のある人。 ●心臓に障害のある人。 ●熱の高い人(38℃以上・有熱期)。(例:急性炎症症状倦怠(けんたい)感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性(とうつう)性疾患の人。 ●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 ●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。 ●背骨(脊椎)に異常のある人または左右に曲がっている人。 ●特に身体に異常を感じているとき。 ●皮膚に創傷のある人。 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 ●温度感覚喪失が認められる人。 ●使用しても効果が現れない人。 ●その他医療機関で治療中の人。 			
 禁止	<p>次のような人は使用しないでください。 症状を悪化させるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●医師からマッサージを禁じられている人。 <p>例: 血栓塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。</p>			
 禁止	<p>交流100V以外では使用しない。 火災・感電・故障の原因になります。</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>子供に使用させない。また本体の上で遊ばせない。乗らせない。 けがや故障の原因になります。</p> <p>本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。</p>	<p>異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。</p> <p>ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p> <p>使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p>	<p> プラグを抜く</p> <p> 分解禁止</p> <p> ぬれ手禁止</p> <p> 水ぬれ禁止</p>	<p>お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。</p> <p>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。</p> <p>ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。</p> <p>水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。本体がぬれた状態では使用しない。湿度の高い環境では使用しない ショート・感電の原因になります。</p>

警告


 指示	<p>使用前に本体カバーが破れていないかを確認する。また、そのほかの部分にも破れがないか確認する。もし破れがある場合には、どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜き、修理を依頼する。</p> <p>布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。</p>	 禁止	<p>布団や毛布をかぶせたり、こたつで使用しない。</p> <p>内部の温度が上昇し、火災や事故、感電の原因になります。</p> <p>改造しない。</p> <p>発火や異常動作、けがの原因になります。</p>	 禁止	<p>業務用として使用しない。</p> <p>喉(のど)はマッサージしない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>電源コードを束ねたままや巻きつけたまま使用しない。</p> <p>発火や発煙の原因になります。</p>
 禁止	<p>本体に乗って立ったり、勢いよく腰をおろしたりしない。</p> <p>けがや故障の原因になります。</p> <p>金属や燃えやすいものを近づけない。たばこを吸いながら使用したり、ストーブなどの火気の近くで使用したりしない。</p> <p>感電やショート、火災の原因になります。</p>		<p>マッサージ以外の目的に使用しない。また頭、胸、腹、骨部へは使用しない。</p> <p>事故やけが、体調不良をおこすことがあります。</p> <p>本体カバーをはずさない。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p> <p>クルマでの使用はしない。</p> <p>事故やけが、故障の原因になります。</p>		<p>素肌や、衣服が濡れている状態で使用しない。</p> <p>けがや感電の原因になります。</p> <p>使用中は眠らない。</p> <p>無意識での使用は、からだへの異常やけがの原因になります。</p> <p>浴室など湿気が多い場所では使用しない。</p> <p>感電および故障の原因になります。</p>

注意


 指示	<p>ACアダプターをコンセントから抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。</p> <p>感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。</p> <p>1回の使用時間は15分以内にし、同一箇所への連続使用はさける。</p> <p>逆効果やけがのおそれがあります</p> <p>使用中、からだに異常があらわれた場合は、ただちに使用をやめて、医師に相談する。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>動かなくなったり、異常が感じられたときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜く。</p> <p>感電・漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。</p> <p>熱を持ったり、異音がするとき、緊急停止させ、ACアダプターをコンセントから抜く。</p> <p>内部の故障、火災のおそれがあります。</p> <p>十分な強度・設置面のある場所に設置する。</p> <p>十分な強度・設置面がないと正しく使用できず、故障や事故の原因になります。</p>	 禁止	<p>ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使わない。</p> <p>故障の原因になります。</p> <p>首の前方はマッサージしない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。</p> <p>変色・変形・感電・故障の原因になります。</p> <p>次のようなときは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疲労が激しいとき。 ・酒に酔っているとき。 ・湿疹が生じているとき。 ・食前、食後(それぞれ1時間) <p>体調不良をおこすことがあります。</p> <p>直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。</p> <p>色あせ、熱による変形、故障の原因になります。</p> <p>皮膚に直接マッサージしない。</p> <p>けがや事故の原因になります。</p> <p>炎症や傷のあるところに直接使用しない。</p> <p>炎症や傷の悪化の原因になります。</p> <p>頭部・顔周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しない。</p> <p>事故やけがのおそれがあります。</p> <p>他の治療器具と一緒に使用しない。</p> <p>事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。</p>	 禁止	<p>寝る前に使用しない。また貧血、貧血気味の人は使用しない。</p> <p>寝る前・貧血、貧血気味の人が使用すると、睡眠に悪い影響があることがあります。</p> <p>使用にかかわらず、本機の上での飲食はしない。</p> <p>感電や故障の原因になります。</p> <p>落としたり、強い衝撃を与えない。</p> <p>感電やショート、事故の原因になります。</p> <p>本体に異常な負荷を与えない。</p> <p>一度に2人以上で乗るなど、本体に通常ではない負荷を与えないでください。故障や変形の原因になります。</p>
 禁止	<p>この機器は、表面が熱くなるため、熱に敏感でない人、自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人には、使用させない。</p> <p>低温やけどや事故、けがの原因になります。</p>		<p>プラグを抜く</p>		<p>停電のときには、ただちにACアダプターをコンセントから抜く。</p> <p>停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

各部の名称とはたらき

本体

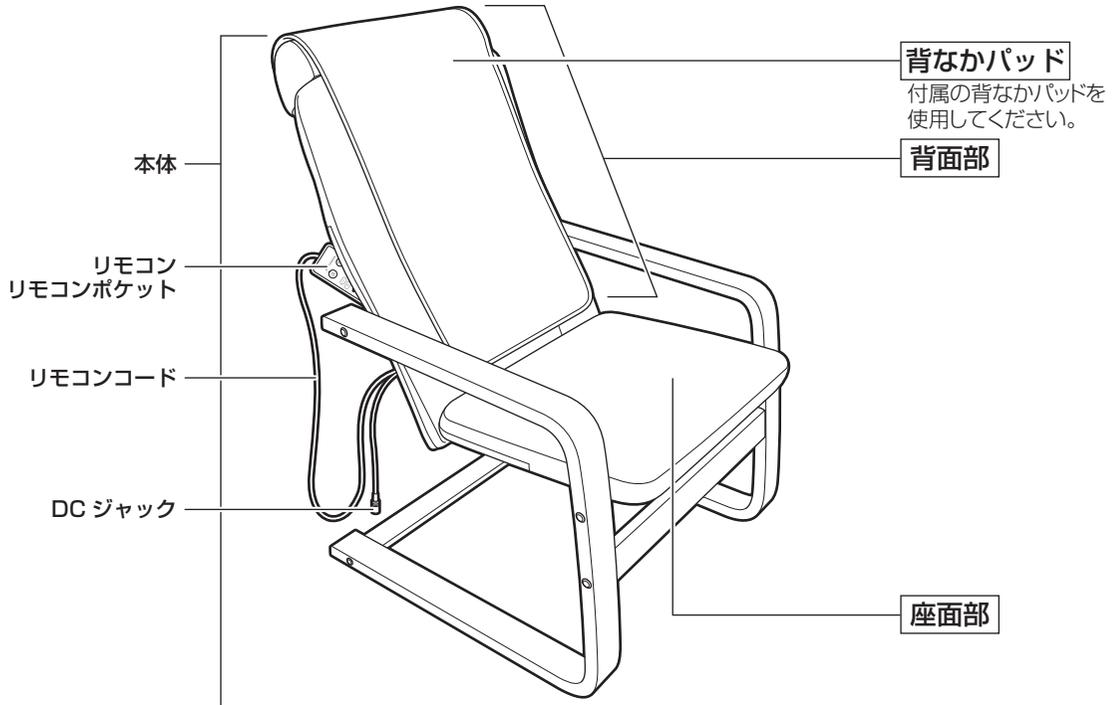


リモコン

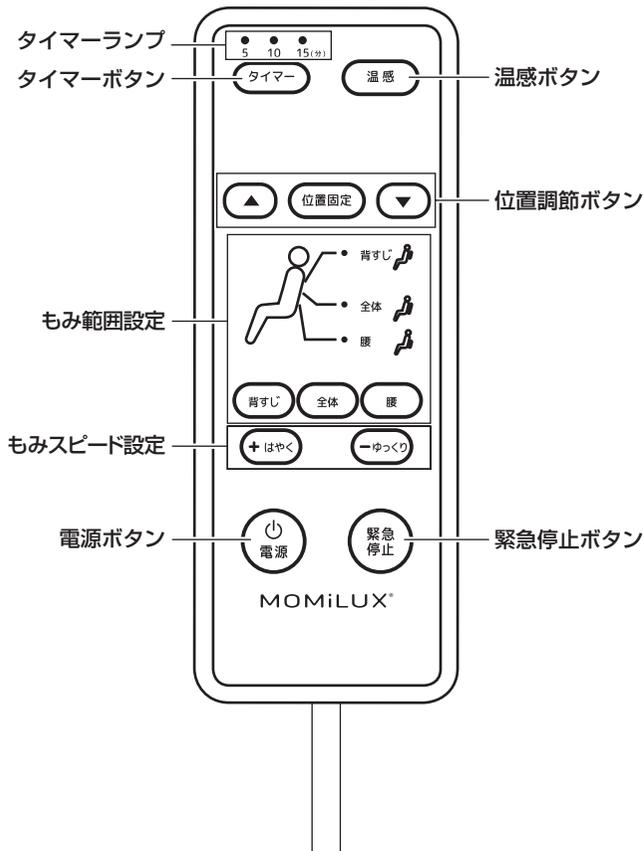

付属品


AC アダプター

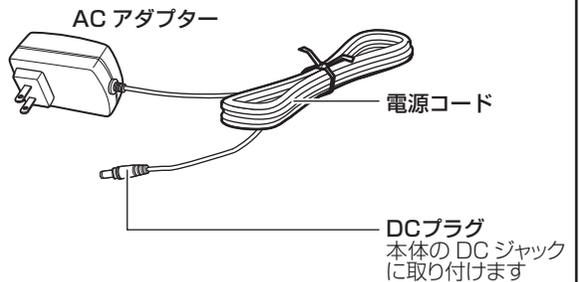

ヘッドレスト



背なかパッド






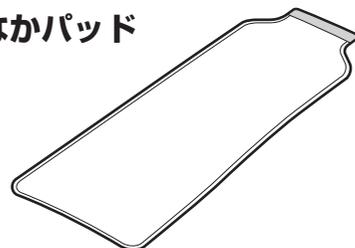


組み立てかた

梱包部品一覧

お買い上げ後、同梱の部品を確認してください。

本体（背面部 + 座面部）.....	各 1 個	ピン.....	1 個
木製フレーム.....	2 個	ダボ.....	8 個
横板.....	2 個	六角レンチ.....	1 個
ACアダプター.....	1 個	ヘッドレスト.....	1 個
長ねじ.....	4 本	背中パッド.....	1 個
短ねじ.....	4 本	取扱説明書（保証書含む）.....	1 個
ねじ受け.....	4 個		

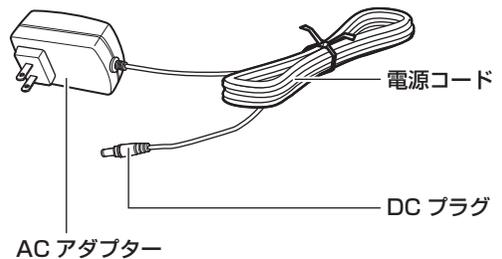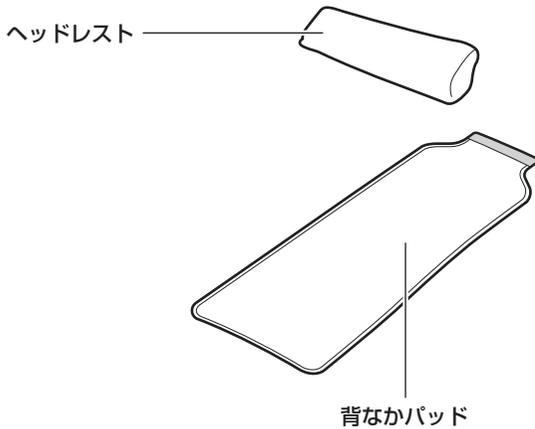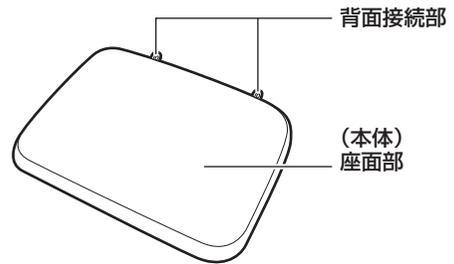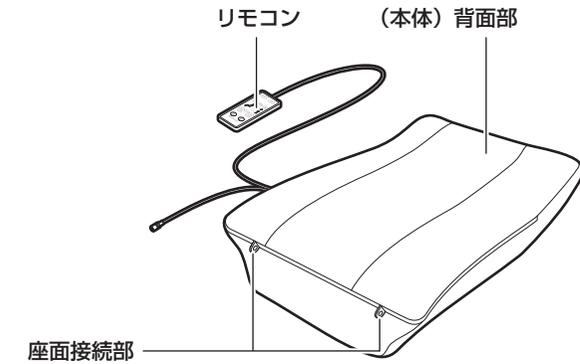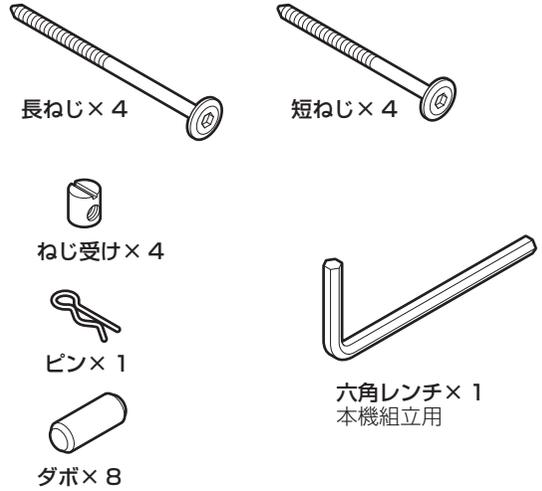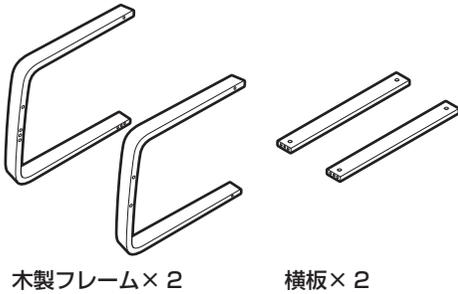


組み立てかた (つづき)

木製フレームの組み立て

一度横板に取り付けられているダボで仮に組み立てをして、長ねじとねじ受けで固定します。


1. 横板にダボを取り付ける

内容物を確認し、ダボを横板1枚に対して4つ、すべて取り付けてください。

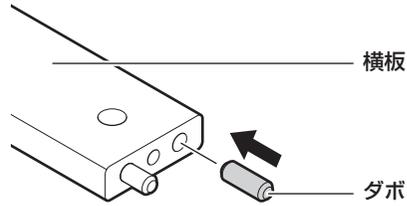



2. 横板2枚、ダボを使ってねじ穴を内側にして木製フレームに取り付ける

木製フレームを立てて組み立てます。横板にあるネジ穴は内側・床側(右下の図参照)になるように取り付けてください。

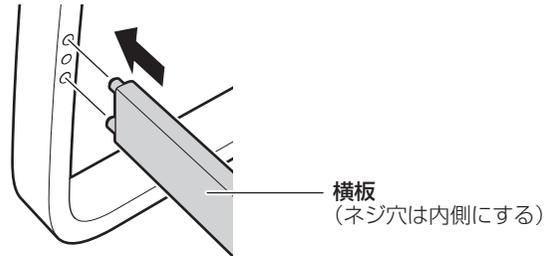

3. 横板にあるねじ穴にねじ受けを入れて長ねじで固定する


ねじ受けのネジ穴を長ねじの入ってくる方向に向けて、ねじ側面から長ねじを入れて組み合わせ、木製フレームと横板を固定させてください(4か所あります)。

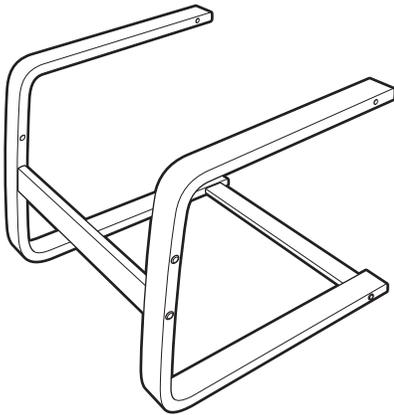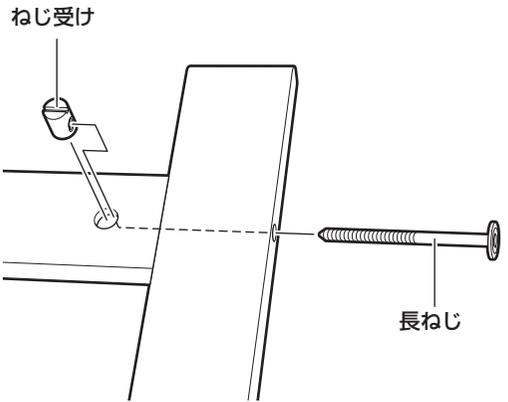

《木製フレーム・組み立て後》

4. 木製フレームを組み立てたら、しっかり組み立てられているか確認する

少し全体的に揺らしてみても、ミシミシ音がしたりすると長ねじがしっかり取り付けられていない可能性があります。

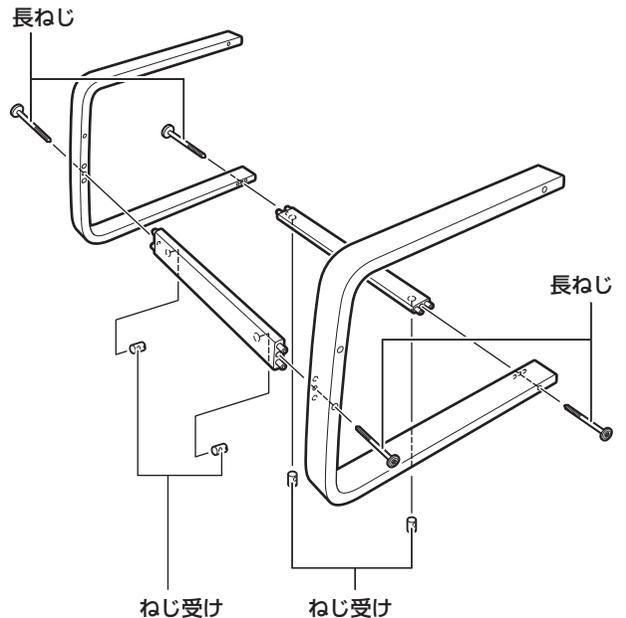

本体（背面・座面）の組み立て


本体の背面と座面を組み立てます。接続部を組み合わせるようにします。

5. 本体背面部と座面部の裏面を上にして接続部を上にする

接続部を向い合せます。

6. 2つの接続部の突起部と穴を組み合わせる

穴に突起部を横からスライドさせて2か所同時に組み合わせるようにしてください。

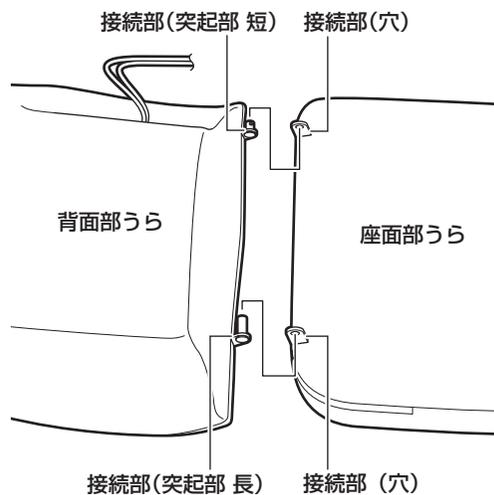



注意 指などはさまないように気をつける。
接続部は金属で扱いかたによっては手をけがするので十分に気を付けてください。

7. 穴を通した突起部にピンを通す

短い突起部にピンを通す穴が開いています。ピンの直線部分をその穴を貫くように取り付けてください。

ピンを通したあと背面部と座面部が自在に動くようになったことを確認する

多少背面部と座面部を動かしてみても、ピンが安易にはずれない状態で、問題なく動くことを確認してください。

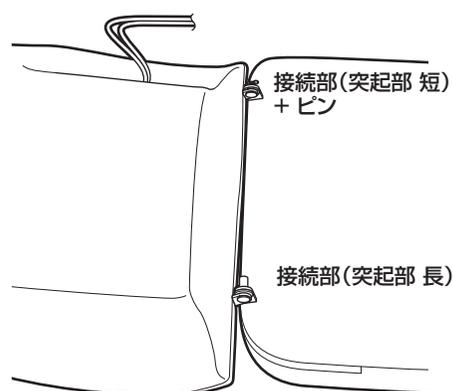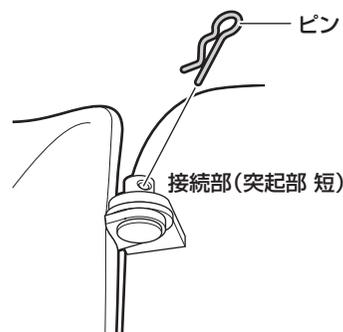


組み立てかた (つづき)

木製フレームに本体を取り付ける

本体の側面に、短ねじで木製フレームに取り付けて行きます。

8. 木製フレーム側面から短ねじを通し、本体側面を取り付ける


本体側面にあるねじ穴を確認し、短ねじを取り付けて固定してください。

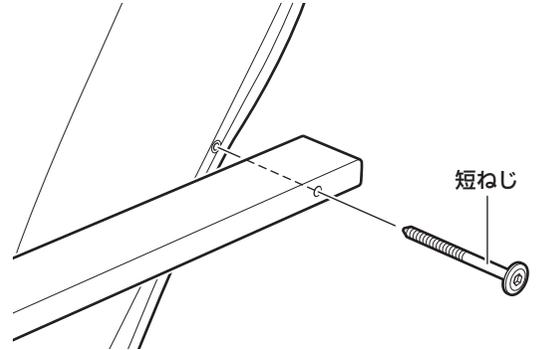


注意 指などはさまないように気を付ける。
接続部は金属で扱いかたによっては手をけがするので十分に気を付けてください。

9. 組みあがったら、揺らすなどしてみて異常がないことを確認する

本体を揺らしてみ、異音がある場合は、取り付けが不十分の場合があります。再度ねじの取り付け具合を確認してください。

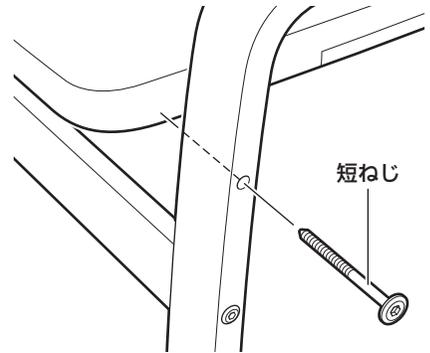

「ヘッドレスト・背なかパッドの使いかた」
(12ページ)

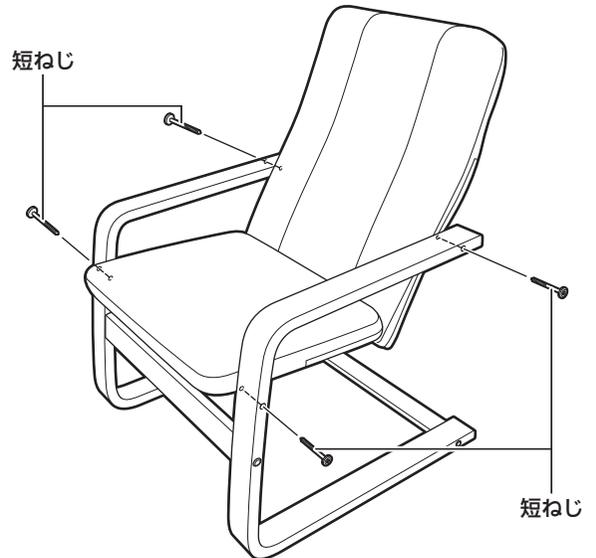

正しい使いかた

効果、効能

- あんま、マッサージの代用
 - 血行促進
 - 疲労回復
 - 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
- 筋肉の疲れをとる
- コリをほぐす

使用目的

- 一般家庭で使用すること



警告

- 本体に取り付けられている本体カバーをはずして使用しない。
 - 使用前には、必ず本体に取り付けられている本体カバーが破れていないか確認する。
 - 破れなどがあるときには、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、絶対に使用しない。
 - 他の治療器と同時に使用しない。
- 事故やけが、体調不良を起こす原因になります。

使用前の準備

本機は5～8ページの組み立てかたに従い、正しく組み立てをしてください。ネジのゆるみや、がたつきなどがない状態で使用してください。

1. 本体の本体カバーが確実に装着され、座面部や背面部に破れなどがないことを確認する

- もみ玉まわりなど注意して確認してください。
 - 破れを発見したときは使用しないでください。
- ※ 本体カバー・座面部カバーの付けはずしはできません。


2. 安定した水平な場所に設置する

正しく設置して使用してください。
※ 前方へ転倒しないようにご注意ください。



注意


- テレビ、ラジオなどから2m以上離して設置する。
雑音の原因になることがあります。
- 床より浮いた状態で使用しない。
床面から浮いた状態がないようにしてください。
- 十分な強度のある設置面に設置する。
十分な強度・設置面がないと正しく使用できず、故障や事故の原因になります。
畳やフローリングなどの床では、傷つくことがありますので、敷物などで床面を保護してください。

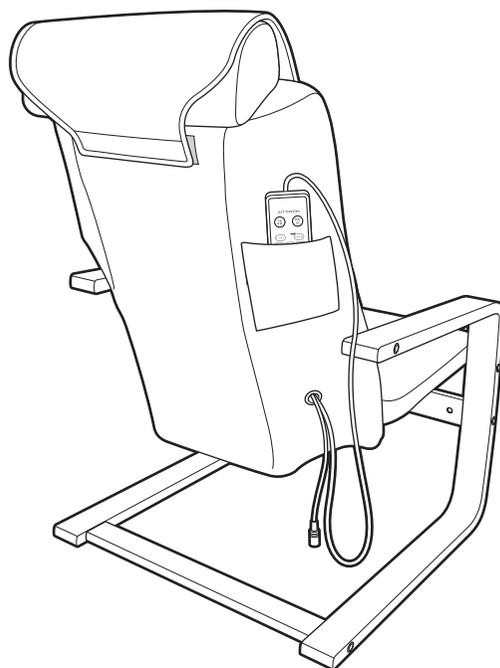

正しい使いかた（つづき）

3. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックとつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込む

ACアダプター、DCプラグとも確実に差し込んでください。

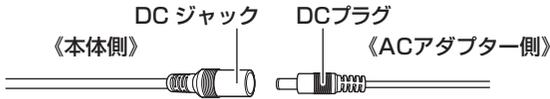

注意 ACアダプターはコンセントの奥まで、DCプラグはDCジャックの奥まで、しっかり差し込む。

4. 電源ボタン、タイマーボタンなどが正常に作動するか確認する

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。

前回使用中に、緊急停止した場合やACアダプターを抜いた場合は前回停止した位置から動作が始まります。正しく終了させてから、再度電源を入れて使用を開始してください（12 ページの手順 8「使用を終えたら、～」参照）。



注意 万が一、本体内部から異音が聞こえたり、熱を持ったりしたときは、すぐに使用をやめてACアダプターをコンセントから抜く。けがややけどの原因になります。

基本的な操作のしかた



次のようなときは使用しない。
 ・疲労が激しいとき ・酒に酔っているとき
 ・湿疹が生じているとき
 ・食前、食後（それぞれ1時間）
 体調不良をおこすことがあります。
 ・寝る前のとき ・貧血の人、貧血気味の人
 睡眠に悪影響を与えることがあります。

1. 本体に座り、電源ボタンを押して電源を入れる①


電源ボタンを押すと電源が入ります。
 ・電源を入れると、全体位置ランプ・タイマー15分ランプが点灯して全体マッサージを開始します。



注意 1回の使用時間は15分以内とし、同一箇所への連続使用は避ける。揉み返しやけがのおそれがあります。

2. 使用中に気分が悪くなったり、異常動作をしたときには緊急停止ボタンで緊急停止させる②

緊急停止ボタンを押すとすべての動きが瞬時に停止します。
 再度動かすときには、一度電源ボタンを押すと、もみ玉が所定の位置に戻り、電源が切れるので、再度電源ボタンを押して電源を入れるところから始めてください。

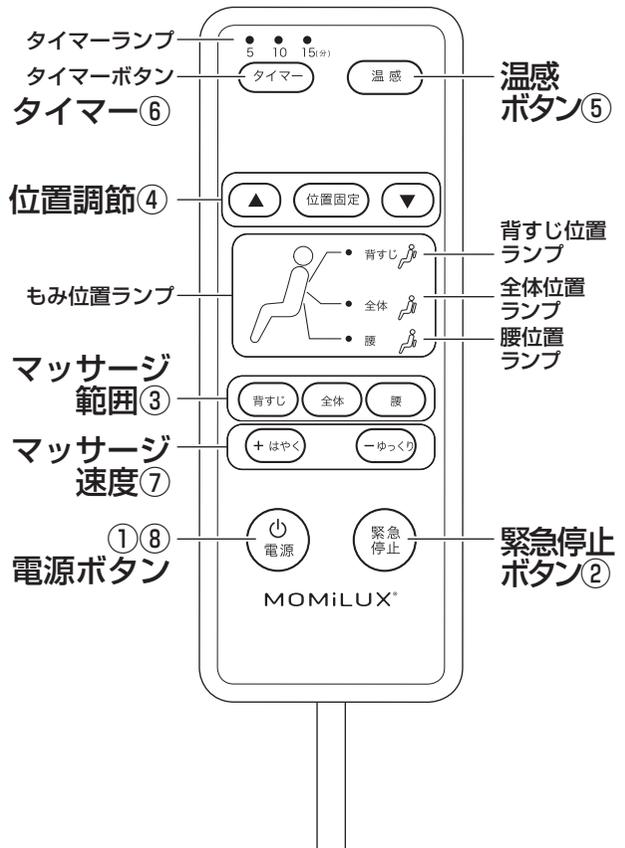

3. もみ玉のマッサージ範囲をお好みに合わせて操作する③

使用開始時は、背すじから腰まで全体をマッサージする全体マッサージモードになっています。腰を中心にマッサージしたいときは、**(腰)**腰ボタン、背すじを中心にマッサージしたいときは、**(背すじ)**背すじボタンを押してください。

- ・押したボタンに合わせてもみ位置ランプが点灯します。

4. もみ玉を固定するときは、**(位置固定)**位置固定ボタンを押す④

(位置固定)位置固定ボタンを押すと、位置固定ランプが点灯し、もみ玉の位置が固定されます。

- ・位置調節ボタン（▼ボタン・▲ボタン）のどちらかのボタンを押している間にもみ玉が上または下方向へ移動します。
- ※「背すじ」「全体」「腰」ボタンのいずれかを選択すると位置固定が解除されます。

⚠注意	首肩部に対する極度に強い刺激は避ける。逆効果やけがのおそれがあります。
⚠警告	子供や自分で意思表示ができない人、体の不自由な人に使用させない。けがの原因になります。

5. もみ玉の温感を使用するときは、**(温感)**温感ボタンを押す⑤

(温感)温感ボタンを押すと、もみ玉に内蔵されたヒーターが作動します。


- ・温感の使用をやめるときは、**(温感)**温感ボタンを押してヒーターを停止させます。
- ※本機の温感機能は温熱治療効果を目的としたものではありません（40℃程度の低めの温度です）。適度の使用をお願いします。

⚠注意	温感ヒーターが作動したもみ玉に、長時間同一箇所では触れない。低温やけどの原因になります。
------------	--

6. **(タイマー)**タイマーボタンでタイマー時間を設定する⑥

長時間使用しつづけないために、**(タイマー)**タイマーボタンを押して、タイマー時間を設定します。


- ・**(タイマー)**タイマーボタンを押すたびに下記のようにタイマーランプの点灯が変化します。

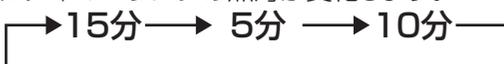

7. マッサージ速度を選ぶ⑦

使用開始時は**(ゆっくり)**モードからスタートします。もみ玉の回転スピードと上下移動スピードを速くしたいときは**(+はやく)**ボタンを押してください。

もみ玉移動範囲

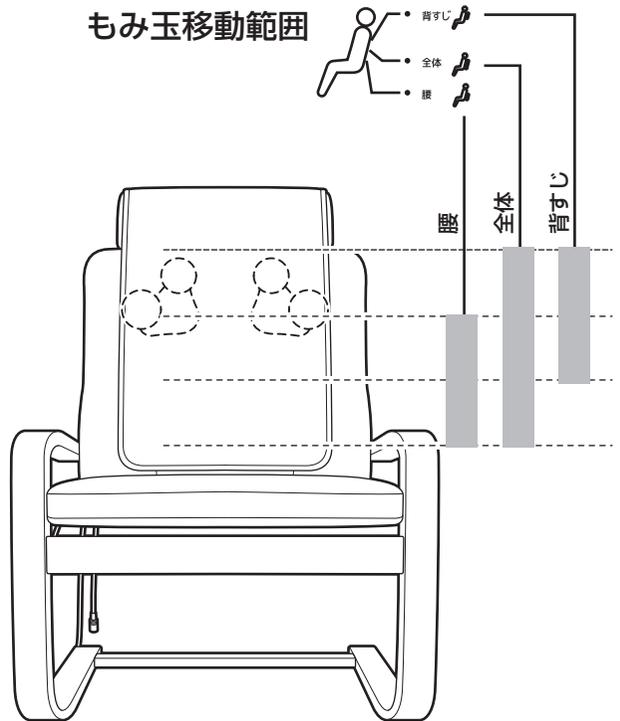

正しい使いかた（つづき）

8. 使用を終えたら、電源ボタンを押して、もみ玉が止まるのを確認してから、ACアダプターをコンセントから抜く^⑧


電源ボタンを押して電源を切ると、もみ玉は所定の位置（腰の下の位置）に戻ります。もみ玉が動いているときは、ACアダプターをコンセントから抜かないでください。

警告

- 使用しないときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。
- お手入れする際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。
感電、火災の原因になります。

注意

- もみ玉が所定の位置に戻るまでは、電源ボタンを押しても電源が入りません。
- AC アダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ず AC アダプターを持って引き抜く。
感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。
- 電源コードを抜くときは、電源コードを持たずプラグを持って引き抜く。
コードを持って引き抜いたりするとコードに無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。

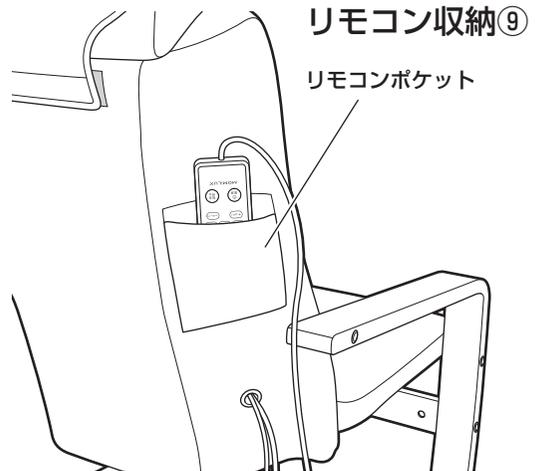

9. リモコンポケットの利用^⑨

リモコンを入れておくことができます。

ヘッドレスト・背なかパッドの使いかた

本製品では本体カバーを取りはずして洗濯することができません。背なかパッドを取り付けて使用することにより、本体の汚れ防止になるとマッサージ強度を調節することができます。


付属の背なかパッドを右図のようにして取り付けます。

1. 本体背面上部のファスナーと面ファスナーにヘッドレストを取り付ける^①

先にファスナーで取り付けてから、本体上部にある面ファスナーを取り付けます。

2. 背なかパッドの面ファスナーを本体背面上部の面ファスナーに取り付ける^②

お好みにより背なかパッドのみ、ヘッドレストのみ取り付けて使用することができます。

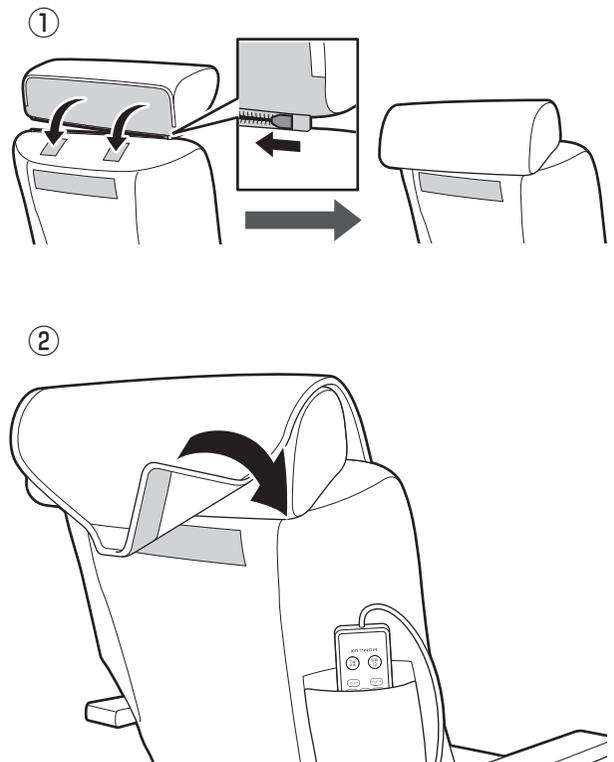

収納のしかた

使用したあとは安全のため、必ず次のように収納してください。

1. リモコンをリモコンポケットに入れる
2. ACアダプターをコンセントから取りはずし、ACアダプターを本体のDCジャックからとりはずす

本体のDCジャックからACアダプターのDCプラグを抜き、まとめておきます。

お手入れと保存

本体のお手入れ

本製品では本体カバーを取りはずして洗濯することができません。そのため、背なかパッドを取りはずして洗濯し、本体は以下の手順で拭き取ってください。

- ①ACアダプターをコンセントから抜く
- ②背なかパッド・ヘッドレストを本体から取りはずす
- ③本体をお手入れする

背なかパッドのお手入れ

- 洗濯タグにある洗濯表示を確認してください。
- 背なかパッドは手洗いすることができます。背なかパッドの入る洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 乾燥機は使用せず、十分に脱水をして形を整えて風通しのよい日かげでつり干ししてください。

お手入れのしかた



警告

- 本体カバーは絶対取りはずさない。
- 本体は絶対に水につけない。

- 乾いた布でからぶきをしてほこりや汚れをふきとります。それでも落ちない汚れは、少し水分を含ませた布や食器用中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、からぶきで水分を落とします。
- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体は水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

保存のしかた

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清掃し、「収納のしかた」に合わせて収納し、湿気の少ないところに整理、保存してください。
- 長期間使用されないときは、付着したごみや髪の毛など(カビや虫が発生する原因になります)を取り除き、ビニールなどをかけて、ホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届かないところに保存してください。

廃棄のしかた

- 本機は一般ゴミでは捨てることができません。廃棄するときは、お住まいの自治体(都道府県、市区町村)の指示に従ってください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	• コンセントに AC アダプターがしっかり差し込まれていない	AC アダプターをしっかりと差し込む
	• 本体の DC ジャックに DC プラグがしっかり差し込まれていない	DC プラグをしっかりと差し込む
電源がすぐ切れる	• 前回電源を切ったときにもみ玉が所定の位置に移動中だった	もみ玉が所定の位置にもどるまで待つて再度電源を入れる
マッサージ運転中に停止した	• タイマーによって最大約 15 分すぎると、自動的に停止します	再度電源を入れる
電源ボタンを押すと、もみ玉が移動して停止する	• 前回使用時に緊急停止ボタンを押して停止させた	再度電源を入れて使用を開始する
ACアダプターをコンセントに差しただけで、もみ玉が移動する	• 前回使用時に電源を「切」にせずに AC アダプターをコンセントから抜いた	もみ玉が所定の位置にもどるまで待つて再度電源を入れる
	• 前回電源を切ったときにもみ玉が所定の位置に移動中だった	もみ玉は最初は所定の位置に戻るものなので、故障ではありません
電源を切るとモードが全体モードになる	• 本機は電源投入時は全体モード、温感なし、所定の位置から始まるようになっています	故障ではありません
音がする	• 構造上、音が発生するものなので、故障ではありません	故障ではありません
音が大きい	• 通常よりも音が大きいときは、本体に乗ったり立ったりして負荷をかけ、内部に異常が発生した可能性があります	負荷をかけずに音が大きくなったのであれば、様子を見て、直らないようであれば、お客様相談室にご相談ください

長年ご使用のマッサージ器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- 電源コードや AC アダプターが異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはドゥシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

仕 様

類 別	機械器具 77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード 34662000)
販売名	リラックスチェアマッサージャー
型 番	DRC-1801
医療機器認証番号	231AGBZX00002000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50 - 60Hz 20W
定格消費電力	DC12 V 20W (ヒーター6W)
ACアダプターコード長さ	約 2.0m
タイマー	自動オフ 15分
外形寸法(組立時)	幅 約 61 × 奥行 80 × 高さ 90 cm
質 量	約 13 kg (ACアダプター・付属品含む)
材 質	(張地) 本体 : ポリエステル (本体内部) : スチール・ABS 樹脂 (座面内部) : ウレタンフォーム (脚部) : 木 (積層材)
もみ回数	はやく : 35 (回/分) ゆっくり : 27 (回/分)
上下移動速さ	はやく : 0.87 (cm/秒) ゆっくり : 0.69 (cm/秒)
ヒーターの最高温度	背なか部 : 50°C 以下
付 属 品	AC アダプター、背なかパッド、ヘッドレスト、取扱説明書・保証書
製造販売元	株式会社ドウシシャ 東京都品川区東大井 1-8-10
製造業者	XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
原 産 国	中国

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

MOMILUX

操作方法や機能説明などをホームページで公開中



<http://momilux.jp/index.html>

故障・修理についてのご相談に関しては…

【受付時間】 9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャお客様相談室

☎0120-104-481

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター

〒915-0857 福井県越前市四郎丸町52-5

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

 **株式会社ドウシシャ** www.doshisha.co.jp MOMiLUX ホームページ <http://momilux.jp/index.html>

作成 2018年12月29日 (初版)
*作成 2019年 1月15日 (第2版)