


シートマッサージャー DMS-1501

取扱説明書・保証書

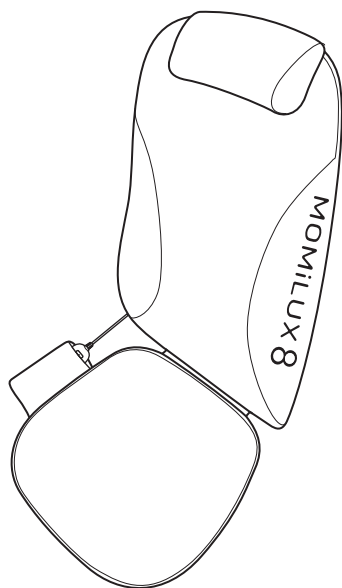

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

も く じ

| | |
|----------------|------------|
| 安全上のご注意 | P.2 ~ P.3 |
| 各部の名称とはたらき | P.4 |
| 正しい使いかた | P.5 ~ P.10 |
| お手入れと保存 | P.10 |
| 修理・サービスを依頼する前に | P.11 |
| アフターサービスについて | 裏表紙 |
| 保証書 | 裏表紙 |



仕 様

| | | |
|----------|--|----------------------------------|
| 品名 | MOMiLUX8 シートマッサージャー | |
| 型名 | DMS-1501 | |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージャー | |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 | |
| 医療機器認証番号 | 227AGBZX00076000 | |
| 電気定格 | AC100V 50/60Hz 30W | |
| 本体 | 定格電圧 | DC12V |
| | 定格消費電力 | 30W (ヒーター 8W) |
| ACアダプター | 定格電圧 | 入力 / AC100V 0.8A 出力 / DC12V 2.5A |
| | 定格周波数 | 50/60 Hz |
| | 型番 | IVP1200-2500P |
| | コード長 | 約 1.8 m |
| タイマー | 自動オフ切替 (10分 / 15分 / 20分) ※初期設定 15分 | |
| 外形寸法 | 背部: 幅 約 43 × 高さ 67 × 厚み 13.5 cm (ヘッドレスト含まず) | |
| | 座面: 幅 約 42 × 奥行 36 × 厚み 3.5 cm (リモコン含まず) | |
| 質量 | 約 5kg (ACアダプター含む) | |
| 材質 | メッシュ生地: ポリエステル78%、ナイロン22% 起毛生地: ポリエステル 100% | |
| | 本体 : ABS樹脂、ポリウレタン | |
| 付属品 | ACアダプター、ヘッドレスト、取扱説明書・保証書 | |
| 製造販売元 | 株式会社ドウシシャ 東京都品川区東大井 1-8-10 | |
| 製造業者 | XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (中国) | |



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意









- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

| | |
|--|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。) |





図記号の意味と例

| | |
|---|--|
|  | ⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。) |
|  | ●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。) |






警告

| | |
|---|--|
|  指示 | <p>医師の治療を受けている人や、次のような人は医師または専門家に相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人。 ●安静を必要とする人。 ●悪性腫瘍のある人。 ●心臓に障害のある人。 ●熱の高い人(38℃以上・有熱期)。(例:急性炎症症状倦怠(けんたい)感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性(疼痛(とうつう)性)疾患の人。 ●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。 ●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人。 ●背骨(脊椎)に異常のある人又は曲がっている人。 ●医師の治療を受けている人や特に身体に異常を感じているとき。 ●皮膚に創傷のある人。 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。 ●温度感覚喪失が認められる人。 ●使用しても効果が現れない人。 ●その他医療機関で治療中の人。 |
|  禁止 | <p>次のような人は使用しないでください。</p> <p>症状を悪化させるおそれがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●医師からマッサージを禁じられている人。 <p>例: 血栓塞栓症、重度の動脈瘤、急性動脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)、など。</p> |
|  禁止 | <p>交流100V以外では使用しない。 火災・感電・故障の原因になります。</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>子供に使用させない。また本体の上で遊ばせない。乗らせない。 けがや故障の原因になります。</p> <p>本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。</p> |
|  指示 | <p>異常時(こげ臭い、発煙など)はACアダプターを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。</p> <p>ACアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>ACアダプターの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したままACアダプターを差し込むと、ショート・火災の原因になります。</p> |
|  プラグを抜く | <p>使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。</p> |
|  プラグを抜く | <p>お手入れの際は、安全のためACアダプターをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。</p> |
|  分解禁止 | <p>分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店までご相談ください(裏表紙参照)。</p> |
|  ぬれ手禁止 | <p>ぬれた手で、ACアダプターを抜き差ししない。 感電の原因になります。</p> |
|  水ぬれ禁止 | <p>水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。本体が濡れた状態では使用しない。湿度の高い環境では使用しない。 ショート・感電の原因になります。</p> |

警告


| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
|  指示 | 使用前には本体カバーが破れていないかを確認する。また、そのほかの部分にも破れがないか確認する。もし破れがある場合には、どんなに小さな破れでも、ただちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼する 布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。 |  禁止 | たばこを吸いながら使用したり、ストーブなどの火気の近くで使用したりしない。 火災のおそれがあります。 |  禁止 | マッサージ以外の目的に使用しない。また頭、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけが、体調不良をおこすことがあります。 |
| |  禁止 | | 本体に乗って寝たり立ったり、勢いよく腰をおろしたりしない。 けがや故障の原因になります。 | | 布団やこたつの中、毛布をかぶせて使用しない。 内部の温度が上昇し、火災や事故、感電の原因になります。 |
| | | | 改造しない。 発火や異常動作、けがの原因になります。 | | クルマでの使用はしない。 事故やけが、故障の原因になります。 |

注意

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
|  指示 | ACアダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ずACアダプターをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。 |  禁止 | 首の前方はマッサージしない。 事故やけがのおそれがあります。 |  禁止 | 他の治療器具と一緒に使用しない。 事故やけが、体調不良を起こすおそれがあります。 |
| | 1回の使用時間は20分以内に、同一箇所への連続使用はさける。 逆効果やけがのおそれがあります | | お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。 | | 使用中は眠らない。 無意識での使用は、からだへの異常やけがの原因になります。 |
| | 頭部・顔周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しない。 事故やけがのおそれがあります。 | | 次のようなときは使用しない。 ・疲労が激しいとき。 ・酒に酔っているとき。 ・湿疹が生じているとき。 ・食前、食後(それぞれ1時間) 体調不良をおこすことがあります。 | | 寝る前に使用しない。また貧血、貧血気味の人は使用しない。 寝る前・貧血、貧血気味の人が使用すると、睡眠に悪い影響があることがあります。 |
| | 使用中、からだに異常があらわれた場合は、ただちに使用をやめて、医師に相談する。 事故やけがのおそれがあります。 | | 直射日光が当たったり、高温になる場所に本体や付属品を置いたりしない。 色あせ、熱による変形、故障の原因になります。 | | 使用にかかわらず、本機の上での飲食はしない。 感電や故障の原因になります。 |
| | 動かなくなったり、異常が感じられたときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜く。 感電・漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。 | | 皮膚に直接マッサージしない。 けがや事故の原因になります。 | | 落としたり、強い衝撃を与えない。 感電やショート、事故の原因になります。 |
| | 設定した以上に熱を持ったたり、異音がするときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜く。 内部の故障、火災のおそれがあります。 | | 炎症や傷のあるところに直接使用しない。 炎症や傷の悪化の原因になります。 | | 本体に異常な負荷を与えない。 一度に2人以上で乗るなど、本体に通常ではない負荷を与えないでください。故障や変形の原因になります。 |
|  禁止 | この機器は、表面が熱くなるため、熱に敏感でない人、自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人には、使用させない。 低温やけどや事故、けがの原因になります。 | | 浴室など湿気が多い場所では使用しない。 感電および故障の原因になります。 |  プラグを抜く | 停電のときには、ただちにACアダプターをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。 |
| | ACアダプターは本品に付属しているもの以外は使わない。 故障の原因になります。 | | 素肌や、衣服が濡れている状態で使用しない。 けがや感電の原因になります。 | | |


各部の名称とはたらき

本体

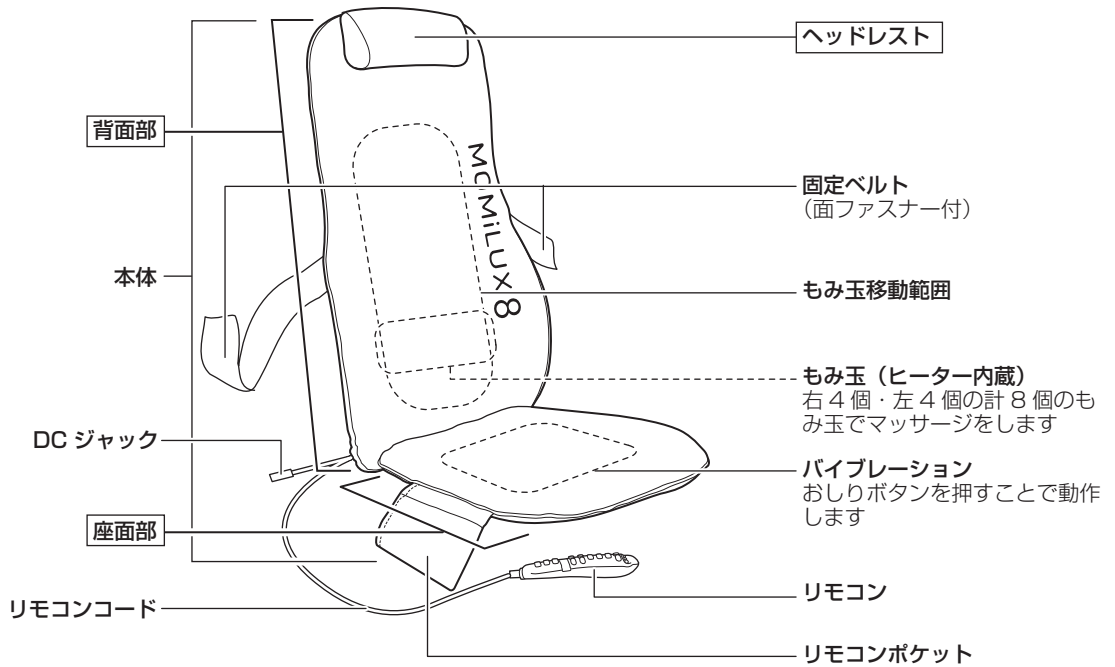

リモコン

本機のリモコンは、使用中のボタンが点灯します。

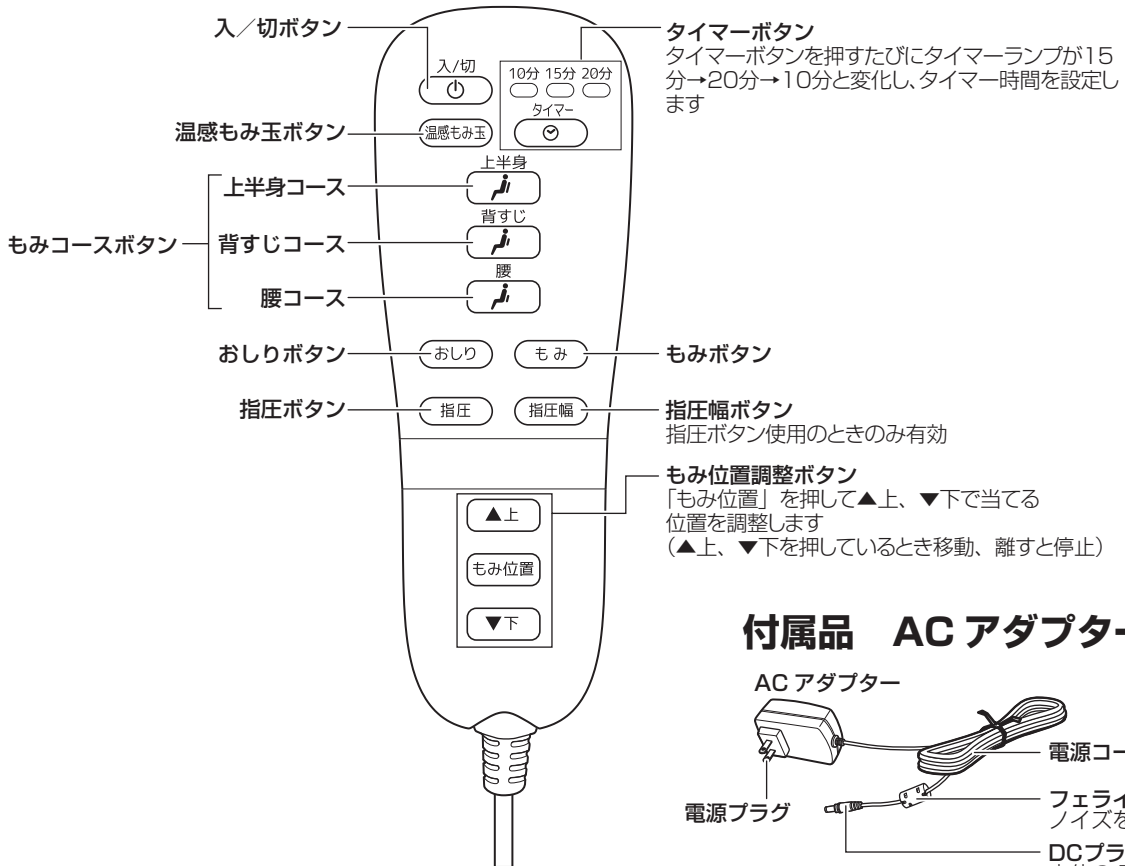


正しい使いかた

効能、効果

- あんま、マッサージの代用
 - 血行促進
 - 疲労回復
 - 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
- 筋肉の疲れをとる
- コリをほぐす


使用目的

- 一般家庭で使用するこ

| | |
|--|---|
|  警告 | <ul style="list-style-type: none">• 本体カバーをはずして使用しない。• 使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する。• 破れなどがあるときには、どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、AC アダプターを抜いて、絶対に使用しない。 |
|--|---|

使用前の準備

本機だけでは使用することができません。背もたれのある椅子や座椅子などに設置して使用します。

| | |
|--|---|
|  警告 | <p>回転する椅子やキャスターの付いた椅子など固定できない椅子には設置しない。 電源コードがからまって転倒したり、断線したり、発煙・発火の原因になります。</p> |
|--|---|


1. 本体カバーが確実に装着され、破れなどが無いことを確認する


- もみ玉まわりなど注意して確認してください。
- 破れを発見したときは使用しないでください。

2. 設置する

正しく設置して使用してください。

- ヘッドレストを本体裏側にある面ファスナーに取り付けてください。
- 椅子に固定するように固定ベルトをまわし、面ファスナーで椅子に固定します。
- ソファなど、固定ベルトを取り付けることができないときは、使用するときだけ、本体背面部をたてかけて、使用してください。

| | |
|--|---|
|  注意 | <ul style="list-style-type: none">• テレビ、ラジオなどから2m以上離して設置する。 雑音の原因になることがあります。• 座面部の手前が浮いた状態で使用しない。 座面の広い椅子を使用し、座面部はすべて椅子などにのせて、下に空間ができないようにして使用してください。椅子から落下したり、力をかけられず、効果が薄くなる原因になります。 |
|--|---|

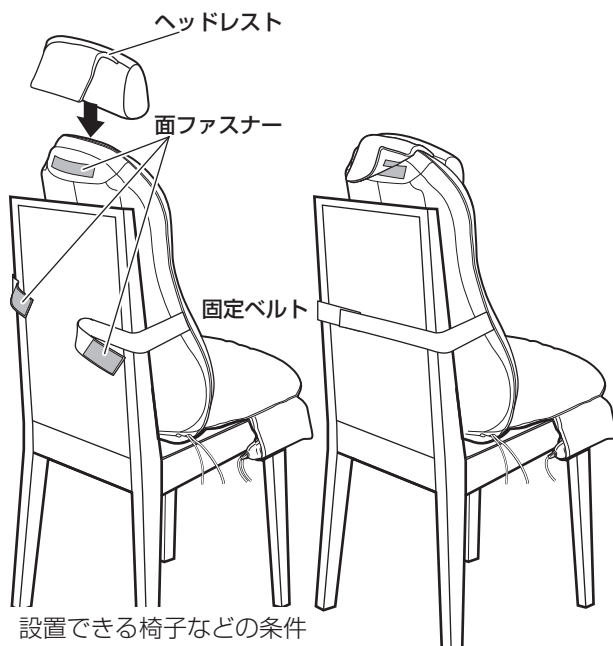


設置できる椅子などの条件

- 座面の幅 45cm、奥行きが 45cm 以上ある
- 十分な強度の背もたれがある(角度は約90度～110度推奨。90度のときは多少手前に出してたてかけるようにする)

正しい使いかた（つづき）

3. ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックとつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込む

ACアダプター、DCプラグとも、確実に差し込んでください。

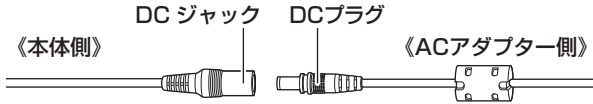

注意 ACアダプターの電源プラグはコンセントの奥まで、DCプラグはDCジャックの奥まで、しっかり差し込む。

4. 入/切ボタン、タイマーボタンなどが正常に作動するか確認する

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、機器が正常かつ安全に動作することを確認してください。

前回使用したときに正しく終了していないと、思いがけない部分から動作が始まる場合があります。正しく終了させてから、使用を開始してください（7ページ「6. 使用を終えたら～」参照）。



注意 万が一、本体内部から異音が聞こえたり、設定以上の熱を持ったりしたときは、すぐに使用をやめてACアダプターをコンセントからはずす。けがややけどの原因になります。

基本的な操作のしかた



次のようなときは使用しない。
・疲労が激しいとき ・酒に酔っているとき
・湿疹が生じているとき ・食前、食後（それぞれ1時間）
体調不良をおこすことがあります。
・寝る前のとき ・貧血の人、貧血気味の人
睡眠に悪影響を与えることがあります。

1. 本体を取り付けた椅子に座り、入/切ボタンを押して動作を開始させる①

入/切ボタンを押すと電源が入り、マッサージが始まります。

・温感もみ玉・バイブレーションは前回使用にかかわらず、「切」状態になります。

※コンセントからACアダプターを抜くと初期設定に戻ります。

2. もみ玉の動作ともみ範囲をお好みに合わせて操作する②

「お好みの動作のしかた」（8～9ページ）により操作します。


3. タイマーボタンでタイマー時間を設定する③

長時間使用し続けられないために、タイマーボタンを押して、タイマー時間を設定します。

※タイマーボタンを押すたびに下記のよう
にタイマーのランプの点灯が変化します。



注意 1回の使用時間は20分以内とし、同一箇所への連続使用は避ける。
逆効果やけがのおそれがあります。

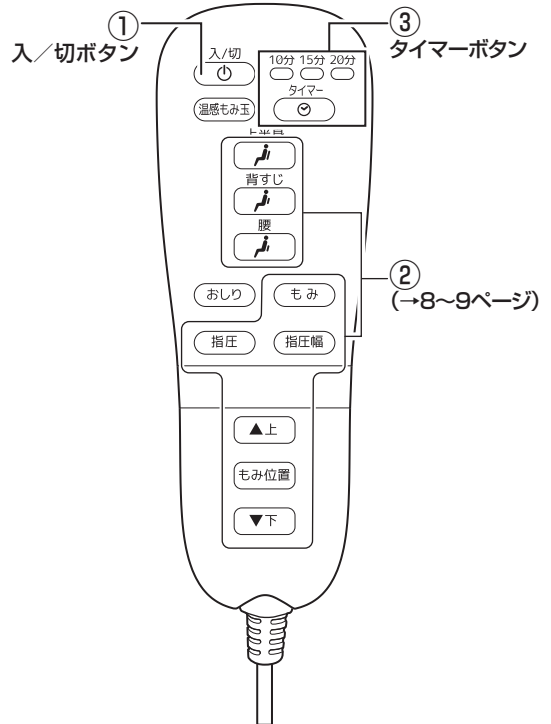


4. もみ玉を温感使用するとき、**温感もみ玉ボタンを押す**④

温感もみ玉 ボタンを押すと、もみ玉に内蔵された温感ランプが点灯します。

- 温感ランプが点灯すると、リモコンの**温感もみ玉** ボタンが点灯します。
- 温感ランプの使用をやめるときは、再度**温感もみ玉** ボタンを押してボタンを消灯させます。

※ 入/切ボタンを押してマッサージを開始していないと、温感もみ玉を点灯させることはできません。

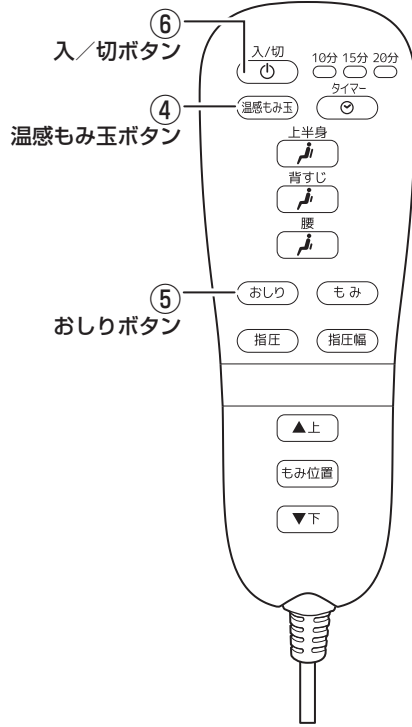


| | |
|-------------|---|
| ⚠ 注意 | 温感ランプが点灯したもみ玉に、長時間同一箇所では触れない。低温やけどの原因になります。 |
|-------------|---|

5. 座面のバイブレーションを使用するとき、**おしりボタンを押す**⑤

おしり ボタンを押すと、もみ球の動きと関係なく、座面のバイブレーションを動作させ、ももやおしりのマッサージをすることができます。

- バイブレーション動作中はリモコンの**おしり** ボタンが点灯します。
- バイブレーションの使用をやめるときは、再度**おしり** ボタンを押してボタンを消灯させます。

※ **入/切** ボタンを押してマッサージを開始していないと、バイブレーションを動作させることはできません。

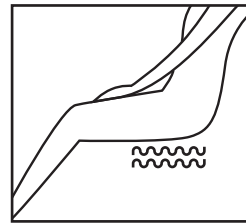

6. 使用を終えたら、**入/切ボタンを押して、もみ玉が止まるのを確認してから、ACアダプターをコンセントから抜く**⑥

電源を切ると、もみ玉は所定の位置（背面部の下方位置）に戻ります。もみ玉が動いているときは、AC アダプターをコンセントからはさないでください。

おしり ボタン
座面のバイブレーション機能

| | |
|-------------|---|
| ⚠ 警告 | <ul style="list-style-type: none"> • 使用しないときは、必ず AC アダプターをコンセントからはさず。 • お手入れする際は必ず AC アダプターをコンセントから抜く。 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。 |
|-------------|---|

| | |
|-------------|---|
| ⚠ 注意 | <ul style="list-style-type: none"> • もみ玉が所定の位置に戻るまでは、入/切 ボタンを押しても電源が入りません。 • AC アダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ず AC アダプターをもって引き抜く。 • コード類は、プラグなど接続部を持って取りはずす。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になることがあります。 |
|-------------|---|

正しい使いかた（つづき）

お好みの動作のしかた

1. 入／切ボタンを押してマッサージ動作を開始させる ①

マッサージは、複雑に左右4つずつの玉でできたもみ玉でやさしくもみ込みます。

※電源を「入」にすると、**もみ**ボタンが点灯してマッサージを開始します ②。

※**入／切**ボタンを押してマッサージを開始していないと、下記のお好みの動作を開始させることはできません。

2. 指圧ボタンを押す ③

人の手による指圧感を再現し、もみ玉がしっかり背中を押し込みます。

指圧ボタン動作中は、指圧幅機能が使用できます。

指圧幅機能 ④

指圧幅ボタンを押すと、左右のもみ玉幅と位置が変化します。

※指圧幅機能は、**指圧**ボタンを使用しているときのみ有効です。

3. もみ位置調整をする ⑤

もみボタンを使用しているときには、もみ位置を上下に調整することができます。

もみ位置調整機能

もみ位置ボタンを押すと**もみ位置**ボタンが点灯し、もみ位置を調整できるようになります。



・ **▲上**ボタン / **▼下**ボタン

もみ位置を上下に調整します。

どちらかのボタンを押している間は、もみ玉が上または下方向へ移動します。


※もみ位置調整機能は**もみ**ボタンを使用しているときのみ有効です。

※指圧のときは操作できません。

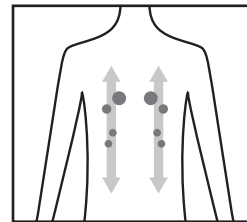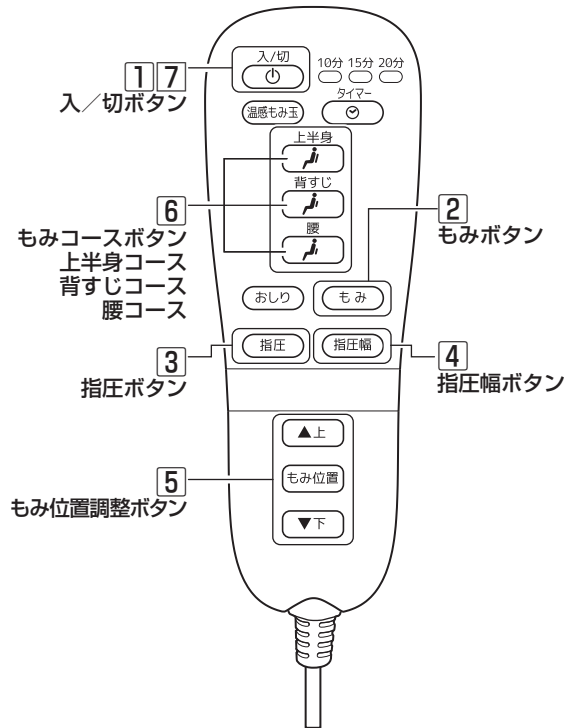

指圧ボタン

ゆっくりともみ玉が上下してツボを刺激します

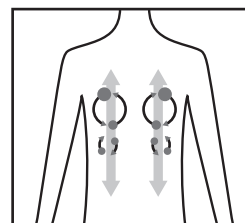




もみボタン

背中から腰部まで、もみ玉が動きながら上下します

もみ位置ボタンでもみ位置を調整できます

4. もみコースボタンを押す⑥

もみコースボタンを押すと、押したコースによって、もみ位置を移動しながらマッサージまたは指圧をしてくれます。

-  **上半身コース**
腰から約 40cm までの高さで、上半身全体をマッサージまたは指圧します。
-  **背すじコース**
背中の上部を中心にマッサージまたは指圧します。
-  **腰コース**
腰部を中心にマッサージまたは指圧します。


5. リモコンポケットの利用


リモコンを入れておくことができます。



6. 使用を終えたら、 入/切ボタンを押して、もみ玉が止まるのを確認してから、ACアダプターをコンセントから抜く⑦

電源を切ると、もみ玉は所定の位置（背面部の下方位置）に戻ります。

| | |
|--|--|
|  警告 | <ul style="list-style-type: none">• 使用しないときは、必ず AC アダプターをコンセントからはずす。 絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。• お手入れする際は安全のため AC アダプターをコンセントから抜く。 感電、火災の原因になります。 |
|--|--|


| | |
|--|---|
|  注意 | <ul style="list-style-type: none">• もみ玉が動いているときは、AC アダプターをコンセントからはずさない。 次回 AC アダプターをコンセントに差したとき、電源を「入」にしないのにもみ玉が動く原因になります。• コード類は、プラグなど接続部を持って取りはずす。 コードを持って引き抜いたりすると接続部に無理な力がかかり、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。 |
|--|---|

正しい使いかた（つづき）

収納のしかた


使用したあとは安全のため、必ず次のように収納してください。

1. 椅子などからとりはずし、リモコンをリモコンポケットに入れる①

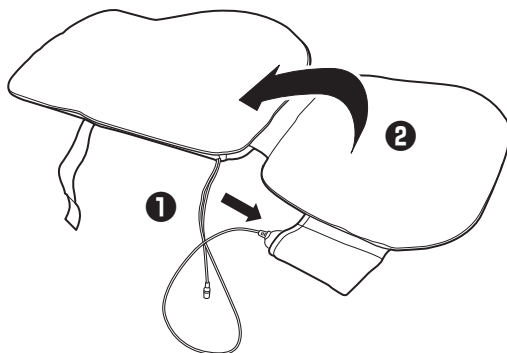

2. 内側に折りたたみ②、固定ベルトでヘッドレストを右図のようにまとめる③

本体の DC ジャックから AC アダプターの DC プラグを取りはずし、まとめておきます。

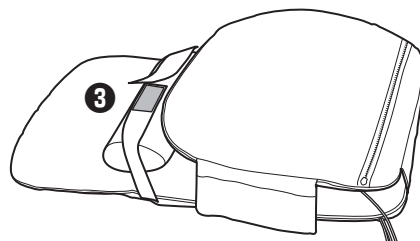

お手入れと保存

お手入れのしかた

警告 カバーは絶対取りはずさない

- 乾いた布でからぶきをしてほこりや汚れをふきとります。それでも落ちない汚れは、少し水分を含ませた布や食器用中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、からぶきで水分を落とします。
- 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- 本体は水をかけて洗わないでください。（感電・故障の原因になります。）

保存のしかた

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように清掃し、「収納のしかた」（10 ページ）に合わせて収納し、湿気の少ないところに整理、保存してください。
- 長期間使用されないときは、付着したごみや髪の毛など（カビや虫が発生する原因になります）を取り除き、ビニールなどをかけて、ホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届かないところに保存してください。

廃棄のしかた

- 本機は一般ゴミでは捨てることができません。破棄するときは、お住まいの自治体（都道府県、市区町村）の指示に従ってください。

修理・サービスを依頼する前に

⚠ 警告 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

| 症状 | 主な原因 | 処置 |
|-------------------------------|---|--|
| 電源が入らない | • コンセントに AC アダプターがしっかり差し込まれていない | AC アダプターをしっかりと差し込む |
| | • 本体の DC ジャックに DC プラグがしっかり差し込まれていない | DC プラグをしっかりと差し込む |
| | • 前回電源を切ったときにもみ玉が所定の位置に移動中だった | もみ玉が所定の位置にもどるまで待つて再度電源を入れる |
| マッサージ運転中に停止した | • 連続運転している（タイマーによって最大約 20 分すぎると、自動的に停止します） | 再度電源を入れる |
| ACアダプターをコンセントに差しただけで、もみ玉が移動する | • 前回使用時に電源を「切」にせずに AC アダプターをコンセントから抜いた | もみ玉が所定の位置にもどるまで待つて再度電源を入れる |
| 音がする | • 故障ではありません | 構造上、音が発生するものなので、故障ではありません |
| 音が大きい | • 通常よりも音が大きいときは、本体に乗ったり立ったりして負荷をかけ、内部に異常が発生した可能性があります | 負荷をかけずに音が大きくなったのであれば、様子を見て、直らないようであれば、お客様相談室にご相談ください |

長年ご使用のマッサージ器はよく点検を

このような症状はありませんか？

- 電源コードや AC アダプターが異常に熱い。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから AC アダプターを抜いて、必ず販売店またはドゥンシヤお客様相談室に点検をご相談ください。